

一般用 SARS コロナウイルス抗原検査キット

BIOCREDIT Covid-19 抗原検査キット Nasal (一般用)



※画像はイメージ


- * この検査薬は、一般用検査薬として厚生労働省の承認を取得した体外診断用医薬品（一般用医薬品）です。
- * 体調が気になる場合等にセルフチェックとして本キットを使用し、陽性の場合には適切に医療機関を受診してください。

【製品概要】

- 分類：第1類医薬品
- 販売名：BIOCREDIT COVID-19 抗原検査キット Nasal (一般用)
- 使用目的：鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原の検出 (SARS-CoV-2 感染疑いの判定補助)
- 特徴：
 - ・イムノクロマト法により新型コロナウイルスの抗原を迅速に検出
 - ・専用の測定装置は不要で、15分後に結果を2色で表示
 - ・使用後の綿棒をチューブに入れたまま安全に廃棄が可能
 - ・袋は使用したデバイスなどを入れるごみ袋として利用可能


検体の採取と測定の手順

1

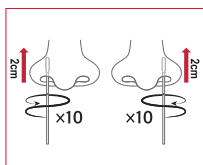鼻腔ぬぐい液
(Nasal Swab)


綿棒を鼻腔約2cmのところまで挿入します。鼻腔の内側の粘膜に沿って綿棒を10回回転させ、粘膜表皮を採取します。同じ綿棒を使用して反対の鼻腔でも同様の操作を繰り返します。

2

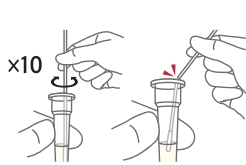


綿棒を緩衝液が入ったチューブに挿入し、10回ほど回転させたのち、細くなっている部分（ブレイクポイント）を目印に綿棒を折ります。

3

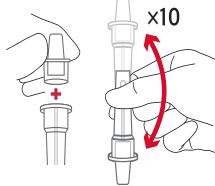

キャップをチューブに押し込み、しっかりとハマっていることを確認し、10回ほどやさしく振り混ぜてください。

4

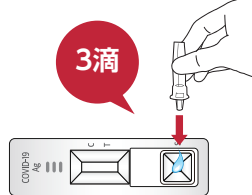

測定の直前に密閉袋からテストデバイスを取り出し、水平な所に置いてください。テストデバイスの検体滴下部に抽出した試料3滴を滴下します。

5




15分後に結果を読み取ります。ただし15分より前でも、コントロールライン及びテストラインが確認された時点で陽性の判定を行うことができます。

測定結果の判定


注意：30分を過ぎたテストデバイスは、判定に使用しないでください。

陰性

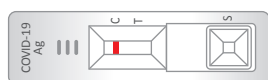


Cラインのみに赤色が現れた場合、結果は陰性です。

陽性

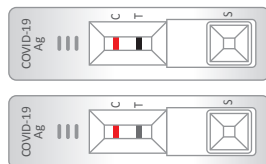

Cラインに赤色、Tラインに黒色が現れた場合、結果は陽性です。

無効

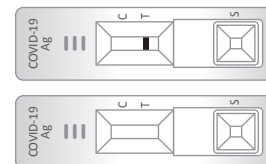

Cラインに赤色が認められない場合は、結果は無効と見なします。別の検査キットでやり直してください。

* この検査薬は、薬剤師から説明を受け、「添付文書」をよく読んでお使いください。検査結果が「陽性」の場合は適切に医療機関の受診等を行ってください。検査結果が「陰性」であっても症状がある場合には、適切に医療機関の受診等を行ってください。

* 本キットや検体採取に使用した綿棒などは家庭ごみとして各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。使用後の綿棒等は感染性を有するおそれがありますので、廃棄時の取り扱いには十分注意し、使用したキット（綿棒、チューブ等を含む）をごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。